



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

ОКП 96 9320

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ ТПГБ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ТЦДЗ.531.003 ПС (разборная)



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией. Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ (в дальнейшем - тележка) предназначена для внутрикорпусной транспортировки грязного белья.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Габаритные размеры тележки: - длина - ширина - высота	858 ± 30 мм 500 ± 20 мм 918 ± 20 мм
Габаритные размеры ёмкости для грязного белья: - длина - ширина - глубина	390 ± 15 мм 250 ± 10 мм 670 ± 15 мм
Масса	12,2 кг
Предельная рабочая нагрузка на тележку	40 ± 1 кг
Усилие, необходимое для перемещения тележки с номинальной нагрузкой, не более	10 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Основание	1
2	Рама	1
3	Скоба	1
4	Ёмкость для сбора белья	2

5	Болт М8х16	4
6	Шайба А8	4
Эксплуатационная документация		
7	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:
Крепежные изделия (болты М8 ГОСТ 7798-70; шайбы А8 ГОСТ 11371-78) поставляются установленными в местах их крепления или уложенными в отдельный пакет.

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

- 4.1. Тележка состоит из основания, установленного на самоориентирующихся колеса, скобы, на которой установлены две емкости для сбора грязного белья с откидными крышками, снабженные полиэтиленовыми пакетами.
- 4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать тележку и очистить ее от упаковочного материала, удалить антикоррозионную смазку протиркой насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, провести техническое обслуживание согласно разделу 5 паспорта. Выполнить санитарную обработку тележки.
- 4.3. При получении тележки в разобранном виде производите сборку согласно рисунка 1.
- 4.4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** использование неисправной тележки.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара: **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ ТПБ**

Серийный номер: [] Дата производства: []

Гарантийный срок: **12 месяцев** со дня продажи

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации: []

Дата продажи: []

ФИО / Подпись: []

М.П.

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен. К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

Наименование покупателя: []

ФИО / Подпись: []

М.П.



Орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной ответственностью
«СПБ-Стандарт»

180004, Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом 611
ОГРН 1117847331414, ИНН 7839448244

№ 39 ОТК/1979 от 11.12.2013 г.

Генеральному директору
АО «ДЗМО»
Касрову А.В.
Адрес: 607033, Нижегородская обл., г. Выкса, рп. Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО»,
здание №1, помещение №001
ОГРН 1025201635203
Тел./факс: +78317748062

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СПБ-Стандарт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.17AG.00001 от 21.04.2014 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изменениями и дополнениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 818, от 21.03.2012 №213, от 04.05.2012 №435, от 18.06.2012 № 506, от 04.01.2013 №182, от 04.10.2013 №870, от 11.11.2013 № 1009):

Наименование продукции	Код ОКП
Изнанка для обшорочеческой подготовки спортсменов: фреско «ВинниПух», КВ-2С	96 1920
Изнанка, жакетно-брючный комплект металлический: тонкий для парашютистов: комплект Белье модели ТПБ, телогрейка парашютносная модели ТБК-2	96 9320
Устройство для лечения вывихов и переломов верхних и нижних конечностей УНК-ДЗМО. Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06818 от 12.11.2013 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения	94 5230

мы выдает обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования в соответствии с требованиями указанных выше документов.

Настоящее решение действует до внесения изменений в документы, утвержденными в соответствии с требованиями обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Также вы можете обратиться к нам по телефону:

С уважением,
Заместитель руководителя
ООО «СПБ-Стандарт»



М.Г. Вавилова

Акционерное общество
«Досчатинский завод медицинского оборудования»

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru



Рисунок 1

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (периодичность раз в год) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений; замене, при необходимости, годными деталями изношенных; промывке моющими растворами и санитарной обработке тележки.
- 5.2. Проверка технического состояния в целях установления возможности дальнейшего использования тележки, проводится на соответствие технических характеристик, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.
- 5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

- 6.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (место консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
- 6.2. Тележка для перевозки грязного белья ТПБ подвергнута в АО «ДЗМО» консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 7.2. Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80% при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
- 9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Тележка для перевозки грязного белья	ТПГБ	
Наименование изделия	Обозначение	

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества	
подпись	
расшифровка подписи	
расшифровка подписи	
число, месяц, год	
число, месяц, год	

Сборщик / упаковщик